

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 049	01	1/4	Nov.2025	Ago.2027
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR				

1. INTRODUÇÃO

Os desfibriladores são dispositivos essenciais para restaurar o ritmo cardíaco em casos de parada cardíaca súbita, e a sua correta limpeza assegura que estejam sempre prontos para uso.

2. OBJETIVO

Manter equipamento limpo e pronto para uso.

3. ABRANGÊNCIA

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da Unidade: supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Executar tarefa semanalmente ou sempre que o equipamento for utilizado.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 049	01	2/4	Nov.2025	Ago.2027
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR				

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Água;
- Detergente neutro;
- Panos limpos;
- Álcool 70%;
- EPI's: avental, óculos, luvas de procedimento.

7. PRINCIPAIS PASSOS

- Higienizar as mãos conforme POP 009 - Higiene das mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente);
- Paramentar - se conforme os EPI's necessários;
- Utilizar pano macio limpo, levemente embebido em álcool 70% ou detergente neutro. Não deixe molhar o equipamento, pois pode danificá-lo.
- Desconectar o aparelho da rede elétrica;
- Desconectar as pás e os cabos do equipamento;
- Remover todo o gel das pás utilizando pano limpo e seco;
- Limpar as pás com pano limpo, embebido em água e detergente neutro.
- Tirar o excesso do detergente neutro com outro pano umedecido em água;
- Secar as pás com pano limpo e seco;
- Realizar desinfecção com álcool 70% através de fricção por 30 segundos;
- Realizar a desinfecção dos cabos com pano embebido em álcool 70%;
- Realizar a desinfecção do equipamento com pano embebido em álcool 70% através de fricção, por 30 segundos, 3 vezes consecutivas;
- Caso o equipamento apresente sujidade visível, umedecer pano com água e detergente neutro para limpeza, retirar excesso com pano úmido em água, secar e fazer desinfecção com álcool 70% através de fricção, por 30 segundos, 3 vezes consecutivas;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 049	01	3/4	Nov.2025	Ago.2027
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR				

- Montar e testar equipamentos;
- Retirar EPI's;
- Higienizar as mãos POP 009- Higiene das mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente)
- Organizar o Ambiente.

8. FATORES DE RISCO DO POP

Biológico e físico.

9. REFERÊNCIAS

PORTAL SAÚDE DA FAMÍLIA. **Limpeza e desinfecção de equipamentos de saúde, 2024.**

Disponível em:

http://portal.saudedafamilia.org/ASF/Documentos/Site/QualidadeSeguranca/108_237_65_9_1_2024_7_55_47_963_Limpeza%20e%20Desinfec%C3%A7%C3%A3o%20de%20Equipamentos%20de%20Sa%C3%Bade.pdf. Acesso em: 30 maio 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE. **PO.CME.002-00: Desinfecção de materiais SAV. [S.I.]: INTS, 2023.** Disponível em:

https://ints.org.br/wp-content/uploads/2023/07/PO.CME_.002-00-Desinfeccao-de-Materiais-SAV.pdf. Acesso em: 30 maio 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.** Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf>. Acesso em: 30 maio 2025.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 049	01	4/4	Nov.2025	Ago.2027
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR				

10. ANEXOS

Não se aplica.

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Elaboração do procedimento
01	Todos os itens	Atualização do procedimento

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	N/A	N/A	N/A
01	Maria Joceli Princival Keller – Responsável Técnica de Enfermagem	Aline Regina Scheidt - Apoio Enfermagem NQS	Ana Beatriz Siqueira Xavier Pock Direção Técnica

