

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Fisioterapia				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 128	01	1/5	jun./2026	mar./2028
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo mostrar o passo a passo da limpeza e desinfecção do turbilhão, desta forma, garantindo que o equipamento esteja apto para ser utilizado com segurança nos pacientes que realizam fisioterapia no Centro de Especialidades Terapêuticas - CET.

2. OBJETIVO

Realizar limpeza e desinfecção do turbilhão.

3. ABRANGÊNCIA

Auxiliar de Serviços Gerais

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da Unidade: Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

Auxiliar de Serviços Gerais: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Executar a limpeza diariamente e/ou quando necessário. Realizar preferencialmente na parte da manhã para que o equipamento fique disponível para uso durante o dia.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Fisioterapia				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 128	01	2/5	jun./2026	mar./2028
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

EPI's NECESSÁRIOS:

- EPIs - Luva de borracha;

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

- Perflex;
- Esponja;
- DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO + PHMB a 1% ou Hipoclorito a 1% (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções);
- Detergente (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções).

7. PRINCIPAIS PASSOS

7.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

1. Higienizar as mãos conforme rotina;
2. Reunir os materiais necessários (item 6);
3. Utilizar os EPIs – Luvas de borracha;
4. Retirar a água do turbilhão e esfregar o interior com uma esponja e detergente, prestando atenção na turbina, ralos, soldas e outras áreas que podem deter germes;
5. Enxaguar cuidadosamente com água limpa a superfície interna do turbilhão;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Fisioterapia				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 128	01	3/5	jun./2026	mar./2028
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

6. Limpar a superfície interna do turbilhão com perflex e DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO + PHMB a 1% ou Hipoclorito a 1%;
7. Retirar os EPIs e higienizar as mãos;
8. Registrar o procedimento em folha de registro própria (Apêndice 1).

8. FATORES DE RISCO DO POP

Biológico, físico e químico

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. Brasília, DF: ANVISA, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html. Acesso em: 30 dez. 2025.

PROFILÁTICA. **Seminário Profilática – setembro de 2021: transmissão**. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://profilatica-com-br.rds.land/seminario-profilatica-setembro-21-transmissao>. Acesso em: 30 dez. 2025.

OLIVEIRA, H. M.; SILVA, C. P. R.; LACERDA, R. A. **Políticas de controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil: análise conceitual**. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 50, n. 3, p. 502–508, 2016.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Fisioterapia				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 128	01	4/5	jun./2026	mar./2028
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

10. APÊNDICE

APÊNDICE 1 - REGISTRO DE LIMPEZA DO TURBILHÃO

REGISTRO DE LIMPEZA DO TURBILHÃO

Patrimônio:[illegible]

*A limpeza deve ocorrer diariamente, quando o equipamento estiver em uso.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Fisioterapia				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 128	01	5/5	jun./2026	mar./2028
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Data (mês/ano)	Item	Descrição da revisão
00	06/2024	N/A	Elaboração do POP
01	06/2026	N/A	Revisão de POP

12. APROVAÇÃO

Nº da Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	Adriano Ademir Strugala	Julio C. P. Romani RT Fisioterapia 18/06/2024	Lucas Foltz 29/07/2024
01	Adriano Ademir Strugala 22/05/2026	Julio C. P. Romani RT Fisioterapia 25/05/2026	Carolina de Almeida Torres Direção DAE 25/05/2026 Conforme PA nº 64418/2026

