

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 47 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE OXÍMETRO**

Setembro/2019



**OBJETIVO:** Manter oxímetro limpo, desinfetado e livre de microrganismos.

**EPI's NECESSÁRIOS:** Jaleco.

**RESPONSABILIDADES:**

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

**MATERIAIS:** Álcool 70% e panos limpos e secos.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Realizar lavagem das mãos e antissepsia com álcool 70%;
- Umedecer pano com álcool 70%;
- Realizar fricção por 30 segundos, 3 vezes consecutivas, aguardando o álcool secar entre uma fricção e outra;
- Realizar lavagem e antissepsia das mãos conforme os POP's específicos.

**OBSERVAÇÕES:**

Em caso de sujidade por resíduos orgânicos, realizar a limpeza com pano umedecido com pouca água e detergente neutro. Após, enxaguar com pano umedecido com água, secar e fazer desinfecção. Cuidar para não molhar o aparelho para não danificar.

**FATORES DE RISCO DO POP:** Químico.