

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 48 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBU

Setembro/2019



OBJETIVO: Disponibilizar o AMBU livre de microrganismos.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, máscara, óculos, luvas e sapatos fechados.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Escova, solução de água e detergente neutro, panos limpos e secos.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Realizar lavagem das mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Desmontar todo o AMBU;
- Lavar com detergente neutro, esfregando com auxílio de escova;
- Enxaguar com água corrente e deixar secar em ar ambiente;
- Imergir em hipoclorito 1% por 30 minutos;
- Enxaguar com água corrente novamente e deixar secar em ar ambiente;
- Embalar em papel grau cirúrgico/plasteril, colocar data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e químico.