

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 49 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR**

Setembro/2019



**OBJETIVO:** Manter equipamento limpo e pronto para uso.

**EPI's NECESSÁRIOS:** Jaleco e luvas.

**RESPONSABILIDADES:**

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

**MATERIAIS:** Água, detergente neutro, panos limpos e álcool 70%.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Desconectar o aparelho da rede elétrica;
- Desconectar as pás e os cabos do equipamento;
- Remover todo o gel das pás utilizando pano limpo e seco;
- Limpar as pás com pano limpo, embebido em água e detergente neutro. Tirar o excesso do detergente neutro com outro pano umedecido em água;
- Secar as pás com pano limpo e seco;
- Realizar desinfecção com álcool 70% através de fricção por 30 segundos;
- Realizar a desinfecção dos cabos com pano embebido em álcool 70%;
- Realizar a desinfecção do equipamento com pano embebido em álcool 70% através de fricção, por 30 segundos, 3 vezes consecutivas;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 49 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO DESFIBRILADOR**

Setembro/2019

- Caso o equipamento apresente sujidade visível, umedecer pano com água e detergente neutro para limpeza, retirar excesso com pano úmido em água, secar e fazer desinfecção com álcool 70% através de fricção, por 30 segundos, 3 vezes consecutivas;
- Montar e testar equipamentos;
- Retirar EPI's;
- Higienizar as mãos.

**FATORES DE RISCO DO POP:** Biológico e físico.