

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 51 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's)**



Setembro/2019

OBJETIVO: Manter equipamento limpo e pronto para uso.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Escova, detergente neutro, panos limpos e álcool 70%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO - LUVAS DE BORRACHA:

- Lavar com água e detergente neutro nas próprias mãos enluvadas;
- Enxaguar em água corrente, secar e passar um pano embebido em álcool 70%, friccionando 3 vezes no mesmo sentido por 30 segundos;
- Aguardar secar, retirar as luvas pelo avesso, guardar em saco plástico e acondicionar em recipiente;
- Em cada término de atividade, passar um pano embebido em hipoclorito 1% e outro pano embebido em água para retirar o excesso de hipoclorito nas luvas.

PASSO A PASSO DE TRABALHO - ÓCULOS:

- Lavar com água e detergente neutro;
- Enxaguar em água corrente, secar com pano embebido em álcool 70%;
- Fazer desinfecção por 30 segundos, colocar em saco plástico e guardar em recipiente.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 51 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's)**

Setembro/2019

PASSO A PASSO DE TRABALHO - AVENTAL IMPERMEÁVEL:

- Limpar com pano embebido em água e detergente neutro;
- Retirar o excesso com pano embebido em água e secar;
- Com um pano embebido em álcool 70%, fazer desinfecção por 30 segundos em sentido único por 3 vezes;
- Pendurar em local específico pré estabelecido pela instituição.

FATORES DE RISCO DO POP:

Biológico e químico.