

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 50 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO
ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO**



Setembro/2019

OBJETIVO: Disponibilizar artigos desinfetados, prontos para uso no serviço e oferecer segurança aos usuários.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Escova, detergente neutro, panos limpos e álcool 70%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Realizar a limpeza da pêra, manômetro e braçadeira com pano limpo embebido em água e detergente neutro;
- Utilizar pano umedecido com água até a retirada total do detergente neutro;
- Em caso de sujidade e matéria orgânica no manguito de tecido, submeter a lavagem manual com solução de detergente neutro e escova;
- Enxaguar até retirada do sabão e deixar secar;
- Em caso de sujidade e matéria orgânica no manguito de nylon, realizar limpeza prévia com pano embebido em solução de detergente neutro, enxaguar com pano umedecido em água e deixe secar;
- Para a desinfecção, friccionar pano embebido com álcool 70% por 3 vezes consecutivas, aguardando a secagem entre uma fricção e outra;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 50 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO
ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCÓPIO**

Setembro/2019

- Não emergir esfigmomanômetro em solução, somente fazer a fricção com álcool 70%;
- Para a limpeza do estetoscópio, passar pano umedecido com detergente neutro;
- Em seguida, passar pano umedecido com água para enxaguar;
- Após secar, fazer a desinfecção com álcool 70%, friccionando 3 vezes com intervalo de 30 segundos entre uma e outra.

OBSERVAÇÕES:

Equipamento compartilhado entre os trabalhadores, sendo passado de um para o outro, bem como no atendimento ao paciente, sendo necessário especial cuidado na limpeza entre os atendimentos. Em unidades críticas, é recomendável que o estetoscópio seja individualizado, visando prevenir contaminação cruzada. Realizar a guarda do equipamento no setor em local apropriado.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e químico.