

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 52 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO

Setembro/2019



OBJETIVO: Manter equipamento limpo e pronto para uso.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Água, pano limpo, escova, detergente neutro e álcool 70%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO - LÂMINA:

- Lavar a lâmina com escova, água e detergente neutro (não deixar de molho);
- Enxaguar em água corrente e secar;
- Fazer desinfecção com pano limpo embebido em álcool 70%, friccionando por 30 segundos, 03 vezes consecutivas;
- Embalar em papel grau cirúrgico/plasteril, colocando data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário.

PASSO A PASSO DE TRABALHO - CABO:

- Retirar as pilhas;
- Fazer desinfecção com pano limpo embebido em álcool 70%, friccionando por 30 segundos, 3 vezes consecutivas (não molhar dentro do cabo);

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 52 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO

Setembro/2019

- Em caso de sujidade, fazer limpeza com pano embebido em água e detergente neutro e tirar o excesso com pano embebido em água;
- Antes de fazer desinfecção, embalar papel grau cirúrgico/plasteril, colocando data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário.

OBSERVAÇÃO:

Testar o funcionamento do laringoscópio no início do plantão e nunca colocar o laringoscópio em autoclave.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico.