

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM  
**POP 53 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CÂNULA DE GUEDEL**

Setembro/2019



**OBJETIVO:** Manter equipamento limpo e pronto para uso.

**EPI's NECESSÁRIOS:** Jaleco, luvas e sapato fechado.

**RESPONSABILIDADES:**

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

**MATERIAIS:** Água, pano limpo, escova, detergente neutro e álcool 70%.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Lavar a cânula com água e detergente neutro;
- Lavar o interior da mesma com escovinha de cânula, ou jato de água e detergente neutro com seringa de 20 ml;
- Enxaguar em água corrente e secar;
- Imergir em solução de hipoclorito 1% por 30 minutos, e após, enxaguar em água corrente e secar com pano limpo;
- Embalar em papel grau cirúrgico/plasteril colocando data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário;
- Armazenar em local apropriado.

**FATORES DE RISCO DO POP:** Biológico e químico.