

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 54 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ASPIRADOR

Setembro/2019



OBJETIVO: Manter equipamento limpo e pronto para uso.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luvas e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Água, pano limpo, escova, detergente neutro, álcool 70% e hipoclorito 1%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Desmontar o sistema de aspiração e desprezar o conteúdo na pia do expurgo;
- Lavar o frasco e a tampa para retirar o excesso de matéria orgânica;
- O látex deve ser ordenhado para facilitar a limpeza interna;
- Enxaguar;
- Após estarem secos, colocar o frasco, tampa e látex em solução de hipoclorito 1% em imersão por 30 minutos;
- Após esse tempo enxaguar em água corrente e secar sobre um pano limpo;
- O látex deve ser encaminhado para a esterilização;
- Realizar desinfecção concorrente através de fricção com pano limpo embebido em álcool 70%, 03 vezes consecutivas, por 30 segundos por fora do aparelho;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 54 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ASPIRADOR

Setembro/2019

- Remontar o aparelho e colocar data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e o nome do profissional.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.