

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM POP 62 - PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - AUTOCLAVE

Setembro/2019



OBJETIVO: Destruir todas as formas de vida microbiana como bactérias, fungos, vírus e esporos. Disponibilizar artigos esterilizados e prontos para uso no serviço e oferecer segurança aos usuários

EPI's NECESSÁRIOS: Gorro, avental, luvas térmicas e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

- **Cirurgião Dentista:** Orientar e supervisionar.

- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Materiais a serem esterilizados, autoclave, fita crepe e caneta.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's específicos;
- Seguir as orientações do fabricante quanto ao manuseio da autoclave;
- Deve-se fazer a verificação da eficácia da esterilização por meio de teste biológico e integrador químico;
- Carregar a autoclave, não ultrapassando 70% da capacidade da câmara;
- Não encostar os pacotes nas paredes;
- Colocar os pacotes maiores embaixo e os menores em cima;
- Deixar as caixas metálicas não perfuradas semiabertas;
- Artigos côncavos devem ser colocados com a abertura voltada para baixo;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 62 - PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - AUTOCLAVE

Setembro/2019

- Deixar um espaço mínimo de 2 cm entre um pacote e outro;
- Colocar sempre a parte plástica dos pacotes voltados para cima;
- Dispor os pacotes embalados em papel grau cirúrgico colocando sempre o papel voltado para baixo;
- Atentar para que a parte de papel dos pacotes esteja voltada com o papel de outro pacote e o plástico com o plástico;
- Entreabrir a porta da autoclave ao final do ciclo de esterilização e aguardar 20 minutos para retirar o material;
- Caso os pacotes estejam umedecidos, substituir a embalagem e submeter a novo processo de esterilização;
- Após o esfriamento dos pacotes, guardá-los em local apropriado.

OBSERVAÇÕES:

- Todo material que for colocado na autoclave deve estar identificado com nome, lote, data de esterilização e validade e nome do responsável pela esterilização.
- Ao final da esterilização os pacotes devem estar secos. Se os mesmos ficaram umedecidos, deve-se verificar a ocorrência de falha técnica (posição dos pacotes, quantidade dos mesmos, volume de água utilizada no ciclo, entre outros);
- Manter a área limpa e organizada.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.