

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 81 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Setembro/2019



OBJETIVO: Detectar precocemente a gravidez.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e luvas de procedimento.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Teste que estiver disponível e frasco coletor de urina.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Informar ao usuário ou acompanhante sobre o procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Certificar-se de que a paciente está com a urina retida por um período mínimo de 4 horas;
- Verificar a data da validade do teste antes de abrir a embalagem, seguir orientações conforme bula, considerando que cada laboratório produz teste com especificações próprias;
- Abrir o invólucro de alumínio e retirar o teste;
- Orientar paciente sobre como proceder (conforme instrução do fabricante);
- Certificar-se com a paciente de que a coleta foi feita conforme as instruções da bula;
- Qualquer anomalia durante a coleta, colher nova amostra;
- Aguardar tempo recomendado pelo teste conforme bula e informar a paciente sobre o resultado;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 81 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Setembro/2019

- Interpretar o resultado: negativo aparece apenas uma faixa na região do controle e positivo aparecem duas faixas iguais e separadas de cores na região do controle do teste;
- Se clinicamente não houver dúvida da gravidez, iniciar pré-natal;
- No caso de dúvida, seguir rotina para diagnóstico;
- Higienizar as mãos;
- Fazer o registro no prontuário.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.