

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
	POP – SMSA 100/2020	02	1/4	15/09/23
LIMPEZA DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARA DE ESCUDO FACIAL				

1. INTRODUÇÃO

Visa orientar a limpeza e desinfecção dos óculos de proteção e máscara de escudo facial.

2. OBJETIVO

Manejo seguro e eficiente dos resíduos para evitar a contaminação cruzada, com vistas à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública.

3. ABRANGÊNCIA

Equipe multiprofissional, Cirurgião dentista, Técnico de saúde bucal e Auxiliar de saúde bucal.

4. RESPONSABILIDADES

- Equipe multiprofissional;
- Cirurgião dentista: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho;
- Técnico de saúde bucal: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho;
- Auxiliar de saúde bucal: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
	POP – SMSA 100/2020	02	2/4	15/09/23
LIMPEZA DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARA DE ESCUDO FACIAL				

5.FREQUÊNCIA

A cada atendimento.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Gorro;
- Máscara;
- Jaleco (avental);
- Luvas de látex;
- Pano descartável ou gaze;
- Detergente líquido;
- Desinfetante hospitalar (SURFIC).

7. PRINCIPAIS PASSOS

- Higienizar as mãos (POP nº 009 – Higienização das Mãos);
- Utilizar EPIs (gorro, máscara, avental/jaleco e luvas de borracha);
- Realizar a limpeza manual com pano macio e solução de detergente líquido;
- Enxaguar abundantemente;
- Desinfetar com pano descartável umedecido em desinfetante hospitalar (SURFIC) e esperar secar;

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA 100/2020		02	3/4	15/09/23
LIMPEZA DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARA DE ESCUDO FACIAL				

- Acondicionar em saco plástico, identificado com o nome do profissional;
- Higienizar as mãos (POP nº 009 – Higienização das Mãos).

8.FATORES DE RISCO DO POP

Biológico

9.REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; MEAC; EBSEH. Limpeza e desinfecção de protetor facial e/ou óculos de proteção – Covid-19. Disponível em:<
<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/assistencia/documentos-covid-19-1/meac/pop/pop-enf-cme-019-limpeza-e-desinfeccao-de-protetor-facial-e-oculos-de-protecao-covid-19.pdf/view> >. Acesso em 13 Set. 2023

10.ANEXOS

Observações:

- Não utilizar álcool na higienização e cuidar no manuseio para evitar riscos.

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA 100/2020		02	4/4	15/09/23
LIMPEZA DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARA DE ESCUDO FACIAL				

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
01	N/A	Elaboração do Procedimento Operacional Padrão da Limpeza dos óculos de proteção e máscara de escudo facial (face shield).
02	N/A	Elaboração do Procedimento Operacional Padrão da Limpeza dos óculos de proteção e máscara de escudo facial (face shield).

12. APROVAÇÃO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
01	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser 04/04/2023	Câmara Técnica da Odontologia 04/04/2023	Regina Mendonça de Carvalho 15/09/2023
02	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser 04/04/2023	Câmara Técnica da Odontologia 04/04/2023	Regina Mendonça de Carvalho 15/09/2023