

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 103 - LUVAS DE BORRACHA**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Manter as luvas limpas, evitando proliferação de microrganismos.

**EXECUTANTE:** Auxiliares em Saúde Bucal e Técnicos em Saúde Bucal.

**ÁREA:** Higienização e desinfecção.

**MATERIAIS:** Detergente líquido, água, panos descartáveis e desinfetante hipoclorito de sódio 1%.

**FREQUÊNCIA:** Sempre que necessário.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Lavar as luvas ainda calçadas, com água e detergente líquido (parte externa das luvas) antes de retirá-las das mãos;
- Enxaguar em água corrente;
- Secar com pano seco e limpo;
- Passar pano umedecido com desinfetante hipoclorito de sódio 1%, conforme as orientações do fabricante;
- Retirar as luvas tocando na parte interna;
- Verificar a presença de furos e rasgos e desprezá-las se necessário, em lixo comum (lixeira de resíduo comum – saco preto);
- Passar pano descartável umedecido com hipoclorito 1% ou quaternário de amônio, conforme as orientações do fabricante, na parte interna e aguardar secar;
- Guardar as luvas do lado avesso em local próprio;
- Higienizar as mãos.