

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 106 - EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS II**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Manter os equipamentos livres de sujidades e desinfetados.

**EXECUTANTE:** Equipe de saúde bucal.

**ÁREA:** Higienização e desinfecção de alta rotação, baixa rotação, contra ângulo e seringa tríplice.

**MATERIAIS:** Escova de limpeza pequena, luvas de borracha, panos limpos, papel toalha, detergente líquido, desinfetante padronizado, lubrificante específico para os equipamentos.

**FREQUÊNCIA:** Antes do início de cada atendimento.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha para a realização da limpeza;
- Lavar com água e sabonete líquido detergente;
- Enxaguar com pano umedecido em água até a retirada total do detergente;
- Secar as peças com papel toalha ou com pano descartável;
- Desinfetar o equipamento com pano umedecido com álcool 70% ou quaternário de amônio conforme instruções do fabricante;
- Lavar as luvas antes de retirá-las;
- Higienizar as mãos.

**OBSERVAÇÕES:**

- Antes da limpeza, as peças devem ser acionadas por no mínimo 30 segundos, dentro da cuspideira, para eliminar conteúdos decorrentes do refluxo.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 106 - EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS II**

Janeiro/2020

- Quando possível, orientamos que os equipamentos passíveis de serem esterilizados sejam encaminhados para esterilização em autoclave ao final de cada turno ou antes, a critério do cirurgião dentista;
- Equipamentos que necessitem de lubrificação devem ser lubrificados ao final de cada turno ou conforme orientação do Cirurgião Dentista. Após lubrificação acioná-los para retirar excesso de lubrificante;
- A lubrificação também precede à embalagem para esterilização, aumentando assim a vida útil dos equipamentos de baixa e alta rotação.