

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
**POP 107 - EQUIPO CADEIRA, MOCHO ODONTOLÓGICO
E REFLETOR**

Janeiro/2020

OBJETIVO: Manter o equipamento livre de sujidades e desinfetado.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Higienização e desinfecção.

MATERIAIS: Luvas, pano descartável e desinfetante padronizado.

FREQUÊNCIA: Ao término do atendimento de cada paciente.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas;
- Lavar com água e sabonete líquido detergente, desinfetar todo o equipamento utilizando pano descartável umedecido com quaternário de amônio;
- Retirar EPI desprezando o de uso descartável ou desinfetando conforme o POP correspondente;
- Higienizar as mãos.

OBSERVAÇÕES:

- Ao término do turno de trabalho, limpar todo o equipamento com desinfetante padronizado;
- Atenção para que o desinfetante padronizado não tenha excesso e penetre no foco do refletor.