

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
POP 108 - LIMPEZA DE AUTOCLAVES

Janeiro/2020

OBJETIVO: Realizar a limpeza da autoclave para manter o equipamento livre de sujidades e para o prolongamento de sua vida útil.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Higienização e desinfecção.

MATERIAIS: Luvas de borracha, máscara, avental impermeável, óculos, panos descartáveis, baldes, escova com cerdas macias e detergente líquido.

FREQUÊNCIA: Semanalmente ou se houver necessidade.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Desligar a autoclave da rede elétrica e deixar esfriar;
- Preparar todo o material necessário para a realização da limpeza (baldes, panos de limpeza, detergente líquido, escova com cerdas macias);
- Colocar os EPI's (avental impermeável, óculos, máscara e luvas de borracha);
- Limpar a parte externa e interna da autoclave com pano umedecido em solução de detergente líquido;
- Enxaguar com pano descartável umedecido em água, repetir o processo até retirar todos os resíduos de detergente;
- Secar com pano limpo e seco as superfícies interna e externa da autoclave;
- Organizar o material utilizado em seus devidos lugares conforme rotina do serviço;
- Lavar as luvas antes de retirá-las e retirar os demais EPI's;
- Fazer a limpeza e desinfecção do avental, óculos e luvas de borracha;
- Higienizar as mãos.