

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
**POP 112 - MONITORAMENTO E TESTE
BIOLÓGICO EM AUTOCLAVE – ROTINA**

Janeiro/2020

OBJETIVO: Organizar o processo de trabalho do pessoal da área de esterilização de materiais e instrumentais.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Esterilização.

MATERIAIS: EPI's, 02 ampolas de teste biológico do mesmo lote, 01 pacote padrão de teste biológico em autoclave embalado em papel grau cirúrgico, formulário ou livro protocolo para registro dos lotes de esterilização e dos testes.

FREQÜÊNCIA: Semanalmente e após manutenção corretiva

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Utilizar EPI's;
- Preparar o material necessário do teste biológico e demais pacotes de artigos a serem esterilizados;
- Colocar dentro do papel grau cirúrgico uma das ampolas de teste biológico, que deve ser identificada em seu próprio rótulo, com o lote de esterilização, a data e hora do teste;
- Selar o pacote com o teste biológico e colocá-lo no ponto mais frio da autoclave (próximo ao dreno, observando informação do fabricante). Nas autoclaves de grande porte posicionar porta meio e fundo, conforme orientação do fabricante;
- Reservar a outra ampola de indicador biológico que será a “ampola controle”. Esta ampola deve ser do mesmo lote da ampola que será processada na autoclave;
- A “ampola controle” também deve ser identificada e NÃO deve ser processada em autoclave. Esta ampola somente será utilizada no momento da leitura da incubação;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
**POP 112 - MONITORAMENTO E TESTE
BIOLÓGICO EM AUTOCLAVE – ROTINA**

Janeiro/2020

- Iniciar o ciclo de esterilização;
- Aguardar a conclusão do ciclo e o resfriamento da câmara da autoclave;
- Retirar o pacote com a ampola da autoclave, acompanhados dos demais pacotes;
- Retirar o frasco processado do pacote e encaminhá-lo, juntamente com a "ampola controle" para a incubadora. Atenção para a correta identificação das duas ampolas e adequada embalagem para um transporte seguro;
- Registrar em formulário ou livro protocolo, lotes de esterilização e o teste em andamento, anotando a data, o lote de esterilização, tempo, temperatura e pressão do ciclo, horário da incubação e nome do responsável pelo teste;
- Higienizar as mãos.

OBSERVAÇÕES:

- O pacote com ampola é similar ao pacote de campo instrumental mais denso e de maior dimensão dentre os que são usualmente esterilizados, ou caixa metálica perfurada com artigos, de modo a oferecer grande resistência à penetração do agente esterilizante;
- O resultado do teste deverá ser registrado na mesma linha onde foi anotado o início do teste, incluindo dia e horário da leitura final enviada pelo Laboratório Municipal, bem como o Resultado - Positivo (+) ou Negativo (-);
- No caso de resultado Positivo, informar ao responsável pela coordenação da unidade, para que sejam tomadas as medidas cabíveis;
- Recomenda-se que, após a autoclave passar por algum conserto ou reparo, sejam realizados 3 ciclos de testes biológicos seguidos, para que seja comprovado o processamento adequado da esterilização.