

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
POP 115 - SISTEMA DE SUCÇÃO

Janeiro/2020

OBJETIVO: Manter o equipamento livre de sujidades e desinfetado.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Higienização e desinfecção.

MATERIAIS: Luvas de borracha, escova para frascos, desinfetante padronizado, formulário próprio ou livro protocolo.

FREQUÊNCIA: Diariamente, ao final do turno de atendimento.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha;
- Descartar a ponta plástica de sugador;
- Limpar com pano descartável umedecido em solução de detergente líquido;
- Enxaguar com panos limpos umedecidos até a retirada do detergente;
- Aspirar aproximadamente 100 ml de hipoclorito 1% ou quaternário de amônio na unidade auxiliar de vácuo ao final de cada turno de atendimento;
- Desinfetar o terminal com pano descartável umedecido com desinfetante padronizado conforme instruções do fabricante;
- Retirar EPI's, desprezando o de uso descartável ou desinfetando conforme POP 09;
- Higienizar as mãos.