

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 114 - TUBULAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Eliminar o biofilme microbiano e manter as linhas de água/tubulações dos equipamentos livres de sujidades e desinfetadas.

**EXECUTANTE:** Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

**ÁREA:** Higienização e desinfecção.

**MATERIAIS:** Luvas de borracha, escova para frascos, desinfetante padronizado, formulário próprio ou livro protocolo.

**FREQUÊNCIA:** Semanalmente em dia pré-estabelecido.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO - 1ª ETAPA - AO FINAL DO TURNO DE TRABALHO, PREFERENCIALMENTE PERÍODO VESPERTINO - NO DIA DA SEMANA PREVIAMENTE PROGRAMADO:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha;
- Retirar o reservatório de água de sua conexão (no equipo) após a conclusão dos atendimentos;
- Lavar o reservatório em água corrente com água e sabão, enxaguar e secar;
- Colocar no reservatório 100 ML de água, hipoclorito 1% ou quaternário de amônio 1%, conforme instruções do fabricante e rosqueá-lo na conexão do equipo;
- Acionar as peças de mão (alta rotação, baixa rotação) e seringa tríplice ou botão de sistema de assepsia da tubulação até esgotar a solução do frasco;
- Retirar EPI's, desprezando os descartáveis e desinfetando os demais com pano limpo umedecido em desinfetante padronizado;
- Higienizar as mãos;
- Registrar em formulário próprio o procedimento de limpeza.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 114 - TUBULAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Janeiro/2020

**PASSO A PASSO DE TRABALHO - 2ª ETAPA - NO INÍCIO DE ATENDIMENTO DO DIA SEGUINTE AO DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas;
- Recarregar o frasco com água potável;
- Acionar as peças de mão, seringa tríplice ou botões do equipo para eliminar o desinfetante residual e sujidades;
- Lavar o reservatório com água e sabão e enxaguar em água corrente;
- Retirar EPI's utilizados, desprezando em local próprio os descartáveis e desinfetando os demais com pano limpo umedecido em desinfetante padronizado;
- Higienizar as mãos.

**OBSERVAÇÕES:**

- Para viabilizar a eliminação do biofilme já estruturado, este procedimento deverá ser realizado no final do turno de 8 horas durante 7 (sete) dias seguidos. Nestes casos, deve-se ter cautela para acionar a tubulação sem as peças de mão (alta rotação, baixa rotação), ou seja, desenroscar as peças antes de acionar as mangueiras para evitar entupimento das peças com resíduos de biofilme já estruturado;
- Após a remoção do biofilme estruturado, a manutenção deve ser feita semanalmente.