

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
POP 117 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E BOMBA A VÁCUO

Janeiro/2020

OBJETIVO: Assegurar o bom funcionamento da máquina e manter seu desempenho.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Drenagem da Unidade.

MATERIAIS: Luvas de borracha, formulário próprio/livro protocolo.

FREQUÊNCIA: Semanalmente em dia pré estabelecido.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha;
- Desligar o compressor/bomba a vácuo, aguardar ao menos 15 minutos, até que esfrie e esteja sem ar comprimido;
- Abrir a válvula do reservatório e deixar drenar toda a água;
- Fechar a válvula após drenagem;
- Retirar EPI's utilizado, desprezando os descartáveis;
- Higienizar as mãos.

OBSERVAÇÕES:

- Caso o compressor possua filtro de ar em que a drenagem não seja automática, também realizá-la uma vez na semana.