

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

POP 125 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA PINÇA PORTA GRAMPOS

Maio/2020

OBJETIVO: Manter equipamento limpo e pronto para uso.

EXECUTANTE: Equipe de saúde bucal.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luvas e óculos.

MATERIAIS: Recipiente e SURFIC®.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Realizar o preenchimento com a solução até o volume desejado e seguro para não transbordar;
- Anexar etiqueta no recipiente/cuba que contenha: nome SURFIC®, data da diluição, horário e validade da solução (30 dias);
- Lavar separadamente e secar a pinça porta grampos;
- Imergi-la na solução de SURFIC® 1%;
- Deixar o artigo imersos por 10 minutos;
- Manter o recipiente com solução de SURFIC® 1% devidamente fechado;
- Ao término do tempo de exposição ao SURFIC® 1% enxaguar os produtos, removendo a solução de sua superfície; Realizar secagem com tecidos e não tecidos estéreis, evitando a recontaminação;
- Embalar em papel grau cirúrgico, colocando data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico.