

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 126 - DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO COM
SURFIC® 1%**

Maio/2020

OBJETIVO: Descrever rotina de desinfecção dos produtos processados; contribuir com o processo de prevenção e controle de infecção na unidade; promover e garantir segurança para o colaborador e paciente; evitar desperdícios e gastos desnecessários.

EXECUTANTE: Equipe de saúde bucal e equipe de Enfermagem.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luvas e óculos.

MATERIAIS: Recipiente e SURFIC®.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos;
- Paramentar-se com os EPIs recomendados;
- Realizar o preenchimento com a solução 1% de SURFIC® até o volume desejado e seguro para não transbordar;
- Anexar etiqueta no recipiente/cuba que contenha: nome SURFIC®, data da diluição, horário e validade da solução;
- Lavar e secar, previamente e separadamente, os produtos a serem desinfetados;
- Imergi-los na solução de SURFIC® a 1%;
- Os canais e lúmens devem ser preenchidos com a solução, com o auxílio de uma seringa ou com um dispositivo específico;
- Deixar artigos imersos por 10 min;
- Manter o recipiente com Solução de SURFIC® a 1% devidamente fechado;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 126 - DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO COM
SURFIC® 1%**

Maio/2020

- Ao término do tempo de exposição ao SURFIC®, enxaguar os produtos removendo a solução de sua superfície e canais;
- Realizar secagem com tecidos e não tecidos estéreis, evitando a recontaminação;
- Embalar e armazenar os produtos conforme procedimento de embalagem, rastreabilidade e armazenagem;
- Retirar luvas;
- Higienizar as mãos.

RECOMENDAÇÕES:

- Utilizar fita teste específica do SURFIC® para checar a atividade da solução em uso por 30 dias. Caso não utilize fita teste, descarte a solução após 24 horas;
- Introduza a zona de reação da fita teste na solução diluída por 3 segundos e então a retire. Agite levemente a fita teste ou encoste-a lateralmente em um papel absorvente para eliminar o excesso do líquido;
- Espere 15 segundos e compare a cor da zona de reação com a escala de coloração apresentada na etiqueta no tubo da fita;
- Realizar o registro de atividade da solução conforme resultado do teste (anexo1);
- Caso o resultado seja inativo, descartar a solução e realizar o preparo de outra;
- Após 30 dias, descartar a solução mesmo se a fita teste estiver reagindo positivamente;
- A conservação do tubo de fitas teste deve ser feita em temperatura ambiente;
- A leitura da fita deve ser realizada exclusivamente no período recomendado no rótulo (após 15 segundos da imersão na solução). Após este período, a coloração da fita continua se alterando.

OBS: Caso a fita seja armazenada como registro, a cor demonstrada não será condizente com a cor apresentada no momento do teste.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 126 - DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO COM
SURFIC® 1%**

Maio/2020

- Ao término do tempo de exposição ao SURFIC®, enxaguar os produtos removendo a solução de sua superfície e canais;
- Realizar secagem com tecidos e não tecidos estéreis, evitando a recontaminação;
- Embalar e armazenar os produtos conforme procedimento de embalagem, rastreabilidade e armazenagem;
- Retirar luvas;
- Higienizar as mãos.

RECOMENDAÇÕES:

- Utilizar fita teste específica do SURFIC® para checar a atividade da solução em uso por 30 dias. Caso não utilize fita teste, descarte a solução após 24 horas;
- Introduza a zona de reação da fita teste na solução diluída por 3 segundos e então a retire. Agite levemente a fita teste ou encoste-a lateralmente em um papel absorvente para eliminar o excesso do líquido;
- Espere 15 segundos e compare a cor da zona de reação com a escala de coloração apresentada na etiqueta no tubo da fita;
- Realizar o registro de atividade da solução conforme resultado do teste (anexo1);
- Caso o resultado seja inativo, descartar a solução e realizar o preparo de outra;
- Após 30 dias, descartar a solução mesmo se a fita teste estiver reagindo positivamente;
- A conservação do tubo de fitas teste deve ser feita em temperatura ambiente;
- A leitura da fita deve ser realizada exclusivamente no período recomendado no rótulo (após 15 segundos da imersão na solução). Após este período, a coloração da fita continua se alterando.

OBS: Caso a fita seja armazenada como registro, a cor demonstrada não será condizente com a cor apresentada no momento do teste.

