

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA 138	1	1/5	16/11/23	
LIMPEZA DA CAIXA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA				

1. INTRODUÇÃO

Remover as sujidades e resíduos de matéria orgânica e/ou inorgânica da caixa de revelação de radiografia odontológica para prevenção e controle de infecção cruzada ao paciente e profissional.

2. OBJETIVO

Realizar a limpeza da caixa de revelação de radiografia odontológica.

3. ABRANGÊNCIA

Equipe multiprofissional:

- Cirurgião dentista;
- Técnico de saúde bucal;
- Auxiliar de saúde bucal.

4. RESPONSABILIDADES

Equipe multiprofissional:

- Cirurgião dentista;
- Técnico de saúde bucal;
- Auxiliar de saúde bucal.

Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho;

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA	1	2/5	16/11/23	
138				
LIMPEZA DA CAIXA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA				

5.FREQUÊNCIA

Executar a tarefa sempre que for utilizada a caixa de revelação de radiografia odontológica

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

EPI's NECESSÁRIOS: luva emborrachada (látex), gorro, máscara, óculos de proteção, avental.

- Sabão líquido neutro, solução de álcool a 70%, pano multiuso descartável ou toalha de papel;
- Sabão líquido neutro – para lavagem das mãos;
- Solução de álcool a 70% - para higienizar / limpeza da caixa de revelação;
- Pano multiuso descartável – para auxiliar na limpeza da caixa de revelação;
- Toalha de papel – para secar as mãos;
- Utilizar EPIs;
- Higienizar as mãos (009-POP Higienização das Mãos);
- Remover qualquer resíduo de película radiográfica e seguir o plano de descarte de resíduos(013 – POP Segregação de Resíduos);
- Remover os copos de revelador, fixador e água e seguir o plano de descarte de líquidos radiográficos resíduo químico/biológico a ser coletado pela empresa responsável (141 - POP Descarte dos líquidos revelador e fixador);
- Friccionar as superfícies da caixa de revelação com pano multiuso semi-descartável ou papel toalha umedecido com sabão líquido;
- Enxaguar com pano multiuso semi-descartável limpo ou papel toalha umedecido com água, para remoção de sujidades e resíduos do sabão líquido;
- Secar toda a superfície com pano multiuso semi-descartável ou papel toalha limpo;

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA	1	3/5	16/11/23	
138				
LIMPEZA DA CAIXA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA				

- Friccionar as superfícies da caixa de revelação com pano descartável ou papel toalha embebido em álcool a 70% (no caso do uso do álcool, friccionar 03 vezes);
- Lavar todos os copos com água e sabão líquido neutro e secar com pano multiuso semi-descartável ou papel toalha limpo;
- Descartar o pano descartável ou papel toalha, no lixo adequado (013 – POP Segregação de Resíduos)
- Remover as luvas, secar e armazenar em local apropriado;
- Higienizar as mãos conforme (009- POP Higienização das Mãos);

8.FATORES DE RISCO DO POP

Biológico

9.REFERÊNCIAS

ARCH HEALTH INVEST (2014) 3 (6): 6-13. Biossegurança na clínica de radiologia odontológica.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: Limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Serviços odontológicos: Prevenção e controle de riscos. Brasília 2006.

DA SILVA, Francine Cristina et al. Estudo da contaminação microbiológica em equipamentos radiográficos. Revista Biociências, v. 9, n. 2, 2003.

ESSENCEDENTAL. Câmara escura com iluminação. Manual de Instruções. Disponível em:< <http://www.essencedental.com.br/Images/portfolio/Produtos/Camara-escura-gold-line-iluminacao/camara-escura-com-iluminacao.pdf>>.

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA	1	4/5	16/11/23	
138				
LIMPEZA DA CAIXA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA				

10. ANEXOS

Observações:

- A caixa de revelação de radiográfica odontológica não deverá servir de depósito de películas radiográficas usadas, nem tão pouco deverá permanecer com a tampa aberta.
- Não deve servir de apoio de objetos de qualquer natureza.
- Deve ser inspecionada rotineiramente e trocada caso haja trincas, rachaduras, que impeçam a vedação completa da luz.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Limpeza da caixa de revelação da caixa de revelação de radiografia odontológica
1	9	Atualização referência e modelo do POP

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Odontologia			
	Nº	Revisão	Página	Vigência
POP – SMSA	1	5/5	16/11/23	
138				
LIMPEZA DA CAIXA DE REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA				

12. APROVAÇÃO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser RTG da Odontologia 28/07/2022	Câmara Técnica da Odontologia 29/08/2022	Câmara Técnica da Odontologia 29/08/2022
01	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser RTG da Odontologia 28/07/2022	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser RTG da Odontologia 16/11/2022	Giovanna Iwersen Pucci Honaiser RTG da Odontologia 16/11/2022