

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DO SETOR

**POP nº 139 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POSICIONADOR DE RADIOGRAFIA
ODONTOLÓGICA INTRA ORAL**

JULHO/2022

Versão 1

OBJETIVO: Remover as sujidades e resíduos de matéria orgânica e/ou inorgânica para prevenção e controle de infecção cruzada ao paciente.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luvas emborrachadas (látex) e óculos.

RESPONSABILIDADES: Cirurgião dentista, Técnico de radiologia, Técnico de saúde bucal e Auxiliar de saúde bucal

- Cirurgião dentista: supervisionar o andamento do serviço;
- Técnico de saúde bucal: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho;
- Técnico de radiologia: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho;
- Auxiliar de saúde bucal: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

- Sabão líquido neutro: para a lavagem prévia do posicionador de radiografia odontológica intraoral e lavagem das mãos;
- Recipiente: para armazenar o líquido (Surfic®);
- Surfic®: para imergir o posicionador de radiografia odontológica intraoral (no caso de desinfecção somente com a utilização do Surfic®);
- Tecido descartável: para secar o posicionador de radiografia odontológica intraoral (evitando a recontaminação);
- Toalha de papel: para secar as mãos;

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Realizar o preenchimento com a solução até o volume desejado e seguro para não transbordar;
- Anexar etiqueta no recipiente/cuba que contenha: nome SURFIC®, data da diluição, horário e validade da solução (30 dias);
- Lavar separadamente e secar o posicionador;
- Imergi-lo na solução de SURFIC® 1%;
- Deixar o artigo imerso por 10 minutos;
- Manter o recipiente com solução de SURFIC® 1% devidamente fechado;
- Ao término do tempo de exposição ao SURFIC® 1% enxaguar os produtos, removendo a solução de sua superfície;
- Realizar secagem com tecido descartável ou papel toalha;
- Embalar em papel grau cirúrgico, colocando data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e assinatura do funcionário;

- Caso seja possível a esterilização em autoclave, realizar o acondicionamento e selagem para esterilização em autoclave;
- Realizar a esterilização em autoclave;
- Descartar o pano descartável ou papel toalha, no lixo adequado (POP 13 – SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS Setembro/2019)
- Remover as luvas, secar e armazenar em local apropriado;
- Higienizar as mãos (POP nº 009/ 2022 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS);

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico

REFERÊNCIAS:

Arch Health Invest (2014) 3 (6): 6-13. Biossegurança na clínica de radiologia odontológica. Brasil.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde:

Limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Serviços odontológicos:

Prevenção e controle de riscos. Brasília 2006.

Biossegurança na Clínica de radiologia odontológica. Salzedas, L.M.P., Oliva A.H., Oliveira L.Q.C,

Simas M.C.O., Coclete G.A. UNESP - Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 2014 Universidade

Federal de Pelotas – RS – Faculdade de Odontologia

Pop da Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://www.saude.ufpr.br/portal/ccio/protocolos-operacionais-padrao-pop/>

Silva FC, Antoniazzi MCC, Rosa IP, Jorge AOC. Estudo da contaminação microbológica em equipamentos radiográficos. Rev biociência Taubaté. 2003; 9 (2): 35-43.

Procedimento: Limpeza e Desinfecção do Posicionador de Radiografia Odontológica intraoral			
Edição	Elaborado por (Nome/Cargo/data)	Aprovado por (Nome/ Cargo/data)	Descrição da Edição
00	Giovanna Iwersen Pucci Honaizer RTG da Odontologia 28/07/2022	Câmara Técnica da Odontologia 29/08/2022	Limpeza e desinfecção do posicionador de radiografia odontológica intraoral