

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 63 - MONITORIZAÇÃO DA AUTOCLAVE

Setembro/2019



OBJETIVO: Garantir a segurança da esterilização durante o ciclo de cada carga.

EPI's NECESSÁRIOS: Gorro, avental e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Cirurgião Dentista:** Orientar e supervisionar.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir as atividades descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Autoclave, caneta esferográfica e formulário específico de controle de autoclave.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Carregar autoclave descrevendo todo material e quantidade de cada item a ser esterilizado;
- Programar o ciclo e iniciar;
- Anotar no formulário específico: início do ciclo, tempo, temperatura, e pressão interna da câmara durante a esterilização.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.