

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 105 - EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS I**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Manter os equipamentos periféricos (aparelho fotopolimerizador, aparelho de ultrassom, amalgamador, aparelho de raios-X, localizador foraminal) livre de sujidades e desinfetados.

**EXECUTANTE:** Equipe de saúde bucal.

**ÁREA:** Higienização e desinfecção.

**MATERIAIS:** Luvas de borracha, panos descartáveis, detergente líquido, desinfetante padronizado.

**FREQUÊNCIA:** Após o uso.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha para realizar a limpeza e desinfecção;
- Limpar todo o equipamento periférico externamente com pano descartável e macio em solução de detergente líquido, cuidando para que o líquido não penetre no equipamento;
- Enxaguar com pano descartável umedecido até retirar todo o detergente e aguardar secagem;
- Desinfetar o equipamento utilizando pano umedecido com quaternário de amônio (na sua ausência usar álcool 70%), conforme orientação do fabricante, cuidando para que o líquido não penetre no equipamento;
- Lavar as luvas antes de retirá-las;
- Higienizar as mãos.

**OBSERVAÇÕES:** Utilizar panos descartáveis.