

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 109 - LIMPEZA DO FILTRO DA AUTOCLAVE**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Realizar a limpeza da autoclave para manter o equipamento livre de sujidades e para o prolongamento de sua vida útil.

**EXECUTANTE:** Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

**ÁREA:** Higienização.

**MATERIAIS:** Luva de borracha, esponja dupla face, escova sintética macia, panos limpos, água e detergente líquido.

**FREQUÊNCIA:** Semanalmente em dia pré-estabelecido ou sempre que necessário.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de borracha;
- Retirar o filtro segundo as orientações do manual e do técnico responsável pela manutenção da autoclave;
- Lavar o filtro em água corrente, retirando sujidades com a escova sintética embebida em solução de água e detergente líquido;
- Enxaguar abundantemente em água corrente;
- Secar com pano limpo;
- Lavar as luvas antes de retirá-las;
- Higienizar as mãos.