

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 123 - USO DO DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
SURFIC® NA ODONTOLOGIA**

Maio/2020

OBJETIVO: Evitar a disseminação de microrganismos responsáveis por infecções relacionadas à saúde, por se tratar de um desinfetante que age limpando e desinfetando simultaneamente.

EXECUTANTE: Equipe da Odontologia.

INDICAÇÕES DE USO: Limpeza e desinfecção simultânea de superfícies e equipamentos

MATERIAIS: Máscara, óculos, luvas, Surfic® a 1%, pano de limpeza descartável, gaze e borrifador.

FREQUÊNCIA: Sempre que necessário para utilização nos serviços.

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS COM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA:

- Borrifar SURFIC® sobre a matéria orgânica cobrindo-a totalmente e aguardar alguns minutos;
- Utilizando um papel toalha ou pá recolher a matéria orgânica;
- Borrifar Surfic® no pano de limpeza descartável dobrado e proceder a limpeza e desinfecção da superfície utilizando a técnica de varredura úmida em sentido único e unidirecional da área mais limpa para a mais suja;
- Repetir a operação quantas vezes for necessário;
- Não necessita enxágue.

Obs.: É biodegradável, podendo ser descartado na rede de esgoto sem danos ao meio ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 123 - USO DO DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
SURFIC® NA ODONTOLOGIA**

Maio/2020

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS SEM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA:

- Com o borrifador, aplicar o produto diluído em um pano até que fique úmido;
- Passar o pano na superfície ou equipamento utilizando varredura úmida, em sentido único e da área mais limpa para a mais suja;
- Não necessita enxágue.

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA AS CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO:

- Antes da limpeza, acionar por 30 segundos as linhas de ar/água após o atendimento para uma limpeza prévia;
- Friccionar gaze umedecida com SURFIC® 1% por todo o equipamento, aguardar o tempo de ação de 10 minutos;
- Passar gaze úmida com água nas pontas antes do contato com o paciente.

No caso de serem esterilizadas:

- Acionar por 30 segundos;
- Envolver as pontas em gaze embebida com solução de detergente enzimático por 5 minutos e friccionar com a gaze;
- Enxaguar e secar;
- Lubrificar acionando o spray duas vezes dentro da caneta, reconectar a caneta no sistema de ar/água e purgar o excesso de lubrificante;
- Embalar em papel grau cirúrgico e esterilizar em autoclave.

Obs.: A lubrificação deve ser realizada ao final de cada turno e antes da esterilização e, após a lubrificação, acionar as pontas para remover o excesso de lubrificante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

**POP 123 - USO DO DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
SURFIC® NA ODONTOLOGIA**

Maio/2020

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE SUÇÃO:

Entre atendimentos:

- Desinfetar o terminal externamente com pano descartável umedecido em SURFIC® 1%;
- Aspirar água.

Obs.: Após procedimentos cruentos realizar a sucção conforme os passos ao final do dia, descritos abaixo.

Ao final do dia:

- Após o passo 2 (aspiração da água), retirar a peneira do sugador, remover resíduos existentes, lavar, enxaguar e recolocar no local;
- Aspirar 50 ml de SURFIC® 1% na unidade auxiliar de vácuo.

PASSO A PASSO DE TRABALHO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS:

Para tratar e eliminar o biofilme já estruturado este procedimento deverá ser realizado durante 7 dias, viabilizando a eliminação do biofilme. A manutenção deverá ser realizada semanalmente.

- Retirar o reservatório de água de sua conexão (no equipo) após a conclusão dos atendimentos;
- Lavar o reservatório em água corrente com detergente neutro, enxaguar e secar;
- Colocar 100 ml da solução de SURFIC® 1% no reservatório de água e rosqueá-lo na conexão;
- Acionar os terminais das peças de mão (sem a alta e a baixa rotação) e seringa tríplice ou o botão de sistema de assepsia da tubulação até esgotar a solução do frasco;
- Aguardar 10 minutos;
- Recarregar o frasco com água potável;
- Acionar as peças de mão e seringa tríplice ou botões do equipo para eliminar o SURFIC® 1% da tubulação, deixando-a preenchida com água potável.