

	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO [Centro de Especialidades Terapêuticas]			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA	00	1/5	
	171			
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESPÉCULO DE OTOSCÓPIO (CONE) E OLIVAS.				

1. INTRODUÇÃO

O risco de transmissão de doenças durante a realização de exames auditivos pode ocorrer tanto do paciente para o profissional, quanto do profissional para o paciente, devido a exposição de microorganismos presentes na mucosa auditiva. Para evitar a contaminação dos pacientes bem como do examinador, são necessárias algumas medidas direcionadas à práticas fonoaudiológicas.

Para a realização da meatoscopia ou inspeção visual do meato acústico externo, recomenda-se o uso de espéculos descartáveis, bem como sondas ou olivas descartáveis para timpanometria, quando possível. De acordo com o Manual de biossegurança elaborado pelo Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, no caso de não poder usar espéculos ou olivas/sondas descartáveis, estes devem sofrer o processo de desinfecção, por serem classificados como artigos não críticos.

Sendo assim, por se tratar de um serviço público, optou-se neste momento por reutilizar os componestes descritos neste POP.

2. OBJETIVO

- Garantir a correta limpeza e desinfecção, removendo sujidades orgânicas e inorgânicas, reduzindo a carga microbiana;
- Garantir de modo sistematizado a desinfecção de materiais em quantidade, qualidade e condições adequadas para o uso, a fim de promover uma assistência segura e eficaz ao paciente e condições de biossegurança ao profissional.



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO [Centro de Especialidades Terapêuticas]			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA	00	2/5	
	171			
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESPÉCULO DE OTOSCÓPIO (CONE) E OLIVAS.				

3. ABRANGÊNCIA

Equipe de enfermagem: Auxiliar de enfermagem, Técnico de enfermagem e Enfermeiro.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da Unidade: Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

Auxiliar e/ou técnico de enfermagem e/ou enfermeiro: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Executar procedimento após uso dos equipamentos pelos profissionais do serviço.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- EPIs – gorro, máscara, óculos de proteção, luvas de borracha, avental impermeável;
- Recipiente plástico de cor opaca com tampa;
- Gaze não estéril, perflex;
- Seringa de 20ml;
- Hipoclorito a 1%;
- Detergente enzimático.



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO [Centro de Especialidades Terapêuticas]			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA	00	3/5	
	171			
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESPÉCULO DE OTOSCÓPIO (CONE) E OLIVAS.				

7. PRINCIPAIS PASSOS

7.1 Limpeza das olivas e espéculos dos otoscópios

- 1 – Higienizar as mãos;
- 2 – Colocar os EPIs: Luva de borracha, máscara, gorro, óculos de proteção;
- 3 – Lavar todas as olivas e espéculos (cones) com água e detergente enzimático; Lavar no lúmen das peças com material macio, evitando que danifiquem as peças;
- 4 – Enxaguar bem os materiais em água corrente, inclusive a parte interna dos cones e olivas com auxílio de seringa;
- 5 – Colocar os materiais sobre perflex limpo para secar; Garantir que os materiais estejam secos antes de colocar na solução desinfetante para evitar que ocorra alteração na sua concentração;
- 6 – Imergir completamente todas as peças em recipiente opaco e com tampa contendo a solução de hipoclorito a 1% por 30 minutos;
- 7 – Retirar os materiais da solução de hipoclorito;
- 8 – Enxaguar rigorosamente em água, até diminuir o odor característico do agente químico;
- 9 – Retirar os materiais e colocar em Perflex limpo para escorrer a água e completar a secagem com pano limpo, seco e macio ou gaze não estéril.
- 10 – As olivas e espéculos deverão ser armazenadas em potes com tampa, com identificação e data da desinfecção, sendo válido por 7 dias;
- 11 – Desprezar a solução de hipoclorito após o uso;
- 12 – Manter a sala limpa e organizada;
- 13 – Retirar os EPIs e higienizar as mãos;



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO [Centro de Especialidades Terapêuticas]			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA	00	4/5	
	171			
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESPÉCULO DE OTOSCÓPIO (CONE) E OLIVAS.				

14 – Armazenar os materiais após desinfecção em local adequado.

8. FATORES DE RISCO DO POP

Biológico, químico e físico.

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html>.

Acesso em 19 set. 2024

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html>.

Acesso em 19 set. 2024

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32. Disponível em:<<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-32-nr-32>>. Acesso em 19 set. 2024

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 09. Disponível em:<<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-9-nr-9>>. Acesso em 19 set. 2024

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Manual de Biossegurança. Disponível em:

<<https://fonoaudiologia.org.br/comunicacao/manual-de-biosseguranca/>>. Acesso em

19 set. 2024



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO [Centro de Especialidades Terapêuticas]			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA	00	5/5	
	171			
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESPÉCULO DE OTOSCÓPIO (CONE) E OLIVAS.				

10. ANEXOS

Não aplicável

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Criação do documento

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	Adriano A Strugala Coordenador do CET DAE – Departamento de Atenção Especializada 06/09/2024	Andrea Jully Enjiu Bernieri RTg Fonoaudiologia 09/09/2024	Carolina de Almeida Torres Direção do DAE – Departamento de Atenção Especializada 19/09/2024